

INDEXEL *TRANSPONDER*

Identificador animales compañía en transponder inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Transponder inyectable (Trans.i.)

Composición:

Microchip preprogramado para la identificación de animales y una antena. Todo ello envuelto en una cubierta tubular de vidrio biocompatible y provisto de una cápsula antimigratoria Bio Bond.

Es una estructura pasiva que se activa mediante una señal de radiofrecuencia (134,2 Khz) que emite el lector.

Fabricado cumpliendo la normativa ISO.

Indicaciones y especies de destino

Equino: Identificación.

Perros y Gatos: Identificación.

Animales exóticos y salvajes: Identificación.

Vía de administración

Inyección subcutánea.

- Comprobar con el lector el número de identificación preprogramado en el *transponder*. Inyectar el *transponder* en el lado izquierdo del cuello.
- Comprobar, de nuevo, el número de identificación colocando el lector a una distancia mínima de 10 cm del lugar de inoculación.

Precauciones especiales

- Material de un solo uso. No puede ser reesterilizado. Destruir el inyector después de su uso.
- Colocar el lector a una distancia de 3 m como mínimo con respecto a cualquier objeto que contenga un motor eléctrico o un tubo de rayos catódicos (un microordenador, un vídeo, etc.).

Modo de conservación

El *transponder* puede ser almacenado y conservado a temperatura ambiente.

Presentación

Blíster estéril con un *transponder* de 11 × 2,1 mm. Un inyector de un solo uso.

Reg. N°

No precisa